

HERMIA



NOTES DE VERSION

OLINDA/EXM[®]

Version 2.3.0



Nom du document : P58-045 Release Notes OLINDA EXM 2.3.0 Rev.4_FR

Traduit du document maître : P58-045 Release Notes OLINDA EXM 2.3.0 Rev.4_EN

Date de révision : 02/27/2024

Ces notes de version informent l'utilisateur des nouveautés et améliorations apportées à OLINDA/EXM 2.3.0, ainsi que des problématiques connues à prendre en considération.

Ceci est un document électronique dont une copie peut être téléchargée à partir de www.hermesmedical.com/ifu. Des copies imprimées des instructions d'utilisateur, des exigences de l'environnement système et des notes de version sont disponibles gratuitement à la demande (autant de copies que de licences achetées).

Les notes de version et le logiciel médical lui-même sont protégés par des droits d'auteur, et tous les droits sont réservés à Hermes Medical Solutions. Ni le logiciel, ni le manuel ne peuvent être de toute manière copiés ou reproduits sans le consentement préalablement écrit de Hermes Medical Solutions qui se réserve le droit d'y apporter des changements et améliorations au logiciel et au manuel à tout moment.

Hermes Medical Solutions*, HERMIA*, le logo* HERMIA et SUV SPECT* sont des marques déposées de Hermes Medical Solutions AB

Les marques tierces utilisées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui ne sont pas affiliés avec Hermes Medical Solutions.

* Sous réserve d'inscription dans certains marchés.



1	INTRODUCTION	3
1.1	DOCUMENTATION ASSOCIÉE	3
1.2	PLAINTES ET INCIDENTS SÉRIEUX	3
2	NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS	4
2.1	FONCTIONNALITÉS INÉDITES MISES EN ŒUVRE DANS OLINDA/EXM® 2.3.0	4
2.2	PROBLÈMES RÉSOLUS ET AMÉLIORATIONS MINEURES DANS LA VERSION 2.3.0	4
3	PROBLÈMES CONNUS	5
4	ASSISTANCE	6
4.1	COORDONNÉES DU FABRIQUANT	6
4.2	REPRÉSENTANTS	6
4.3	FILIALES.....	6

1 INTRODUCTION

Ce document contient les notes de version publiques pour OLINDA/EXM® 2.3. Il fournit une liste des fonctionnalités inédites, des améliorations et des corrections de problèmes apportées depuis la dernière version.

Ce document inclut également les problématiques connues. Chaque utilisateur doit être familier avec ces problèmes connus. Contacter le fabricant pour toutes questions à propos du contenu.

1.1 Documentation associée

- P58-044 Instructions For Use OLINDA EXM 2.3.0 Rev.4

Les instructions d'utilisations contiennent les informations nécessaires de base à la configuration de l'application selon vos préférences.

Le guide d'utilisateur, destiné à assister l'utilisateur dans l'utilisation du logiciel, est disponible à partir de la fonction *Help* dans le logiciel lui-même.

Les messages d'avertissement sont énumérés dans les instructions d'utilisation et dans le guide de l'utilisateur. Les messages d'avertissements décrivent clairement les utilisateurs prévus, les limitations dans le logiciel et les risques que peuvent entraîner les changements au logiciel.

1.2 Plaintes et incidents sérieux

Tout incident sérieux qui s'est produit en lien avec l'appareil doit être rapporté à notre support, voir la section *Assistance*.

Selon les réglementations applicables, les incidents peuvent avoir besoin d'être rapportés aux autorités nationales. Pour l'Union Européenne, les incidents sérieux doivent être rapportés à l'autorité compétente de l'état membre de l'Union Européenne dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Hermes Medical Solutions accepte volontiers les commentaires des lecteurs de ce manuel. S'il vous plaît, veuillez nous signaler toutes erreurs de contenu et de typographie, ainsi que les suggestions d'amélioration à notre support, voir la section *Assistance*.

2 NOUVEAUTÉS ET AMÉLIORATIONS

2.1 Fonctionnalités inédites mises en œuvre dans OLINDA/EXM® 2.3.0

Il n'y a pas de fonctionnalités inédites mises en œuvre dans cette version.

2.2 Problèmes résolus et améliorations mineures dans la version 2.3.0

- Ajout d'explication sur les unités, par exemple MBq·h, dans le manuel de l'utilisateur.
- Ajout d'information par rapport aux modèles spéciaux et les données gastrointestinales dans le manuel de l'utilisateur.
- Ajout d'une note dans le manuel de l'utilisateur déclarant que l'information entrée dans les modèles spéciaux ou dans les modèles spéciaux de la cinématique n'est pas sauvegardée dans les fichiers de cas.
- Ajout d'une note dans le manuel de l'utilisateur à propos des messages d'erreur qui peuvent apparaître en lien avec l'option *Auto Validate*.
- Mise à jour de la boîte « À-propos » et de la barre de titre pour confirmer avec les exigences MDR.

3 PROBLÈMES CONNUS

Il n'y a pas de problèmes connus relatifs à la sécurité du patient cette version de OLINDA/EXM®.

Ci-dessous se retrouve une sélection de problèmes connus ouverts pertinents du côté de l'utilisateur.

Tous les problèmes ont été analysés pour le risque et ont été classés comme acceptables.

- OLINDA (installation autonome) n'aura pas de licence (license fixe) si vous modifiez le chemin d'installation pour un personnalisé (# de case 45898).
- Le rapport de dose ne contient pas la liste des isotopes dans une série de décroissance lors de l'utilisation du modèle sphérique de OLINDA (# de cas 39146).
- La liste des organes affichée n'est pas la même que celle dans les résultats lors de la modification des données (# de cas 44215).
- Le tableau des valeurs cinétiques pour la vessie n'est pas mis à jour correctement lors de l'utilisation du modèle de la vessie.
- L'option *Modify Data* ne fonctionne pas tel que prévu lors de l'utilisation du bouton *Apply*.

4 ASSISTANCE

Contactez l'une des adresses ci-dessous pour obtenir le service, le support ou si vous avez toutes autres questions.

4.1 Coordonnées du fabricant



Siège social
Hermes Medical Solutions AB
Strandbergsgatan 16
112 51 Stockholm
SWEDEN
Tél : +46 (0) 819 03 25
www.hermesmedical.com

Adresse courriel générale :
info@hermesmedical.com

Adresses courriel du support :
support@hermesmedical.com
support.ca@hermesmedical.com
support.us@hermesmedical.com

4.2 Représentants

Représentants autorisés

Personne responsable au Royaume-Uni
Hermes Medical Solutions Ltd
Cardinal House
46 St. Nicholas Street
Ipswich, IP1 1TT
England, United Kingdom

Représentant autorisé en Suisse
CMI-experts
Grellinger Str. 40
4052 Basel
Switzerland

CH	REP
----	-----

4.3 Filiales

Hermes Medical Solutions Ltd
York Suite, 7-8 Henrietta Street
Covent Garden
London WC2E 8PS
UK
Tél : +44 (0) 20 7839 2513

Hermes Medical Solutions, Inc
710 Cromwell Drive, Suite A
Greenville, NC27858
USA
Tél : +1 (866) 437-6372
Télécopieur : +1 (252) 355-4381

Hermes Medical Solutions Canada, Inc
1155, René-Lévesque O., Suite 2500
Montréal (QC) H3B 2K4
Canada
Tél : +1 (877) 666-5675
Télécopieur : +1 (514) 288-1430

Hermes Medical Solutions Germany GmbH
Robertstraße 4
48282 Emsdetten
Deutschland
Tél : +46 (0)819 03 25